

INSTRUKCJA UŻYWANIA Remo-Wax® Oil, aerozol do uszu

Wskazania do stosowania

Remo-Wax Oil aerozol do uszu jest olejkami do pielęgnacji uszu, który zapobiega tworzeniu się korka woskoinowego. Remo-Wax Oil nawilża również skórę przewodu słuchowego oraz łagodzi swędzenie i podrażnienia spowodowane wysuszeniem skóry uszu.

Nie należy stosować Remo-Wax Oil w przypadku:

- stanu zapalnego lub bólu ucha,
- wydzieliny z ucha,
- uszkodzonej, przedziurawionej lub przebitej błony bębenkowej (np. dren pozostawiony po nakłuciu błony bębenkowej),
- uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników aerozolu Remo-Wax Oil.

Specjalne grupy pacjentów

Jeśli pacjent ma problemy z koordynacją ruchową, zaburzenia ruchowe lub drżenie rąk, należy poprosić inną osobę o podanie do przewodu słuchowego produktu Remo-Wax Oil.

Dzieci

Remo-Wax Oil nie może być stosowany u dzieci poniżej 1 roku życia bez konsultacji z lekarzem.

Użytkownicy aparatów słuchowych

Osoby korzystające z aparatu słuchowego, powinny umieścić aparat na miejscu dopiero po wchłonięciu się produktu Remo-Wax Oil, tzn. kiedy pacjent czuje, że ucho jest suche.

Możliwe działania niepożądane

Nie są znane żadne działania niepożądane produktu Remo-Wax Oil. W przypadku podejrzenia, że produkt Remo-Wax Oil spowodował działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Zapobieganie powstawaniu korka woskoinowego

Remo-Wax Oil aerozol do uszu należy rozpylić raz w tygodniu, 1 do 2 razy do każdego przewodu słuchowego. Regularne stosowanie Remo-Wax Oil aerozolu do uszu zapobiega tworzeniu się korka woskoinowego. Remo-Wax Oil można stosować tak długo, jak jest to konieczne.

Leczenie suchości i swędzenia w przewodach słuchowych

Remo-Wax Oil aerozol do uszu należy rozpylić raz w tygodniu lub w razie potrzeby, 1 do 2 razy do każdego przewodu słuchowego. Remo-Wax Oil można stosować tak długo, jak jest to konieczne.

Sposób użycia aerozolu do uszu

- Ogrzać zawartość butelki Remo-Wax Oil do temperatury ciała (około 37°C) przez zamknięcie butelki w dłoni na kilka minut.
- W przypadku użycia aerozolu **po raz pierwszy**, w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia preparatu należy 3-5 razy rozpylić aerozol w chusteczkę lub inny papier. Jeżeli preparat nie jest używany przez jakiś czas, należy się upewnić się, że jest on prawidłowo rozpylany poprzez 1-2-krotne naciśnięcie rozpylacza.

- Delikatnie pociągnąć górną część ucha do góry i do tyłu. Trzymając butelkę w pozycji pionowej, wprowadzić końcówkę dyszy do ujścia przewodu słuchowego. Należy rozpylić 1 do 2 razy preparat Remo-Wax Oil do przewodu słuchowego. Pociągnąć delikatnie płatek ucha w górę i w dół kilka razy, wykonując ruch obrotowy.
- Nadmiar olejku wypływający z ucha zewnętrznego należy wytrzeć np. chusteczką. Nie wolno używać wacika! Po zastosowaniu olejku nie należy płukać przewodu słuchowego.
- Po zastosowaniu należy zdjąć końcówkę dyszy, umyć ją wodą z mydłem, dokładnie wypłukać, osuszyć i ponownie umieścić na miejscu. **Nigdy nie wolno używać aerozolu bez założonej końcówki dyszy!**

Inne informacje

Remo-Wax Oil aerozol do uszu jest przeznaczony do użytku osobistego. Remo-Wax Oil jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego w przewodzie słuchowym.

Jeśli Remo-Wax Oil został przepisany przez lekarza, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia zaleconą przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem Remo-Wax Oil, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Skład

Trójglicerydy średniołańcuchowe
Palmitynian izopropylu
Uwodorniony polidecena.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie daty ważności wydrukowanej na opakowaniu.

Po pierwszym otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Nie należy wyrzucać produktu do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Niewykorzystany produkt należy oddać do apteki w celu utylizacji. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Wielkości opakowań

Remo-Wax Oil 15 ml

Wytwórca

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Dystrybutor

Orion Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa
tel. +48 22 833 31 77
www.orionpharma.info.pl

Data ostatniej aktualizacji niniejszej instrukcji użycia:

31.10.2023



161739-1

10-1-2024/PS

**ORION
PHARMA**

PROOF COLOURS:

■ Black

Size : 150 x 420 mm
Minimum Font 9 pt
Myriad Pro
Pharmacode No. 1406

CE



Wyrób medyczny



Należy zapoznać się z instrukcją używania



Należy przestrzegać ostrzeżeń zawartych w instrukcji używania



Producent



Kraj producenta



Dystrybutor



Tłumaczenie



Dopuszczalna temperatura



Należy użyć do daty



Numer partii